

檢驗項目：Wound /Pus culture

檢驗代碼：130071 (嗜氧培養)

130081 (厭氧培養)

院內檢驗  委外代檢

檢體採檢：1. 採檢時儘量沾取有膿及發炎部位。  
2. 深部傷口建議嗜氧, 厭氧同時送檢。

採檢容器：藍頭嗜氧採檢棒  
黑頭厭氧採檢棒

報告時效：嗜氧培養:3~7 天  
厭氧培養:7~10 天

參考區間：No Growth

危險值：無。

臨床意義：1. 傷口培養常見致病菌為~ Enterobacteriaceae、anaerorobe、Pseudomonas aeruginosa、Staphylococcus aureus、β-Streptococcus spp  
2. 若生長菌為皮膚表面之常在菌, 可能因採檢過程消毒不完全造成污染, 視需要重新送檢.

補單、複檢時效：無。

影響檢驗結果的原因：1. 收集不良的檢體常會有皮膚表面細菌的污染, 而長出太多的非致病菌。  
2. 未在病人服用抗生素前或傷口局部治療之前收集檢體, 易導致藥物干擾培養結果。

是否需患簽署同意書：否

注意事項：採檢後立即送檢, 若不能立刻送至檢驗室應置於室溫。